

Kullanım alanı:


nal von minden Drug-Screen® Cup II – 10C; idrarda bulunması muhtemel olan aşağıdaki parametrelerin, *immunokromatografik* yöntem ile hızlı ve kalitatif tespitini yapan bir test kitidir.

Tespit edilen uyuşturucu maddeler: 10 parametre

- **AMP** > Amfetamin > (Cut-off: 1000 ng/ml)
- **BUP** > Buprenorfin > (Cut-off: 10 ng/ml)
- **BZD** > Benzodiazepin > (Cut-off: 300 ng/ml)
- **COC** > Kokain > (Cut-off: 300 ng/ml)
- **MDMA/XTC** > Ecstasy > (Cut-off: 500 ng/ml)
- **MET** > Metamfetamin > (Cut-off: 1000 ng/ml)
- **MOR/OPI** > Morfin/Opiat > (Cut-off: 300 ng/ml)
- **MTD** > Metadon > (Cut-off: 300 ng/ml)
- **TCA** > Trisiklik Antidepr. > (Cut-off: 1000 ng/ml)
- **THC** > Marihuana/Esrar > (Cut-off: 50 ng/ml)

Test kitinin içeriği:

- Drug-Screen® Cup II – 10C
- Anahtar
- Kullanma talimatı

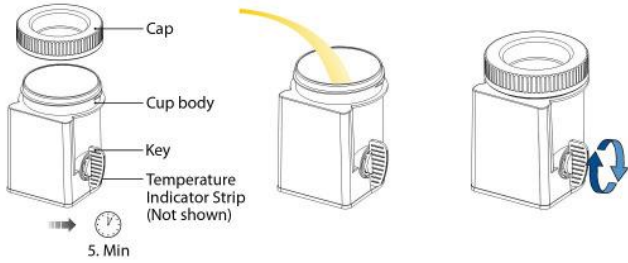

Uyarılar:

- Testler oda sıcaklığında saklanmalıdır. (2-30°C)
- Profesyonel kullanıma yönelik vücut dışı test kitleridir.
- Dış folyo paketlerinin yırtık olmadığına emin olun.
- Son kullanma tarihi geçmiş olan kitleri kullanmayınız.
- Tek kullanımlıktır.

Test prosedürleri:


1. Dış folyoyu açıp test kabını ve anahtarı çıkartınız.
2. Test kapağını açtıktan sonra idrar örneğini kabın içine alıp kapağı tekrar kapatınız.
3. Gerekliyse ilgili bilgileri (Tarih-İsim) doldurunuz.
4. Minimum idrar seviyesine dikkat ediniz.
5. **Testi başlatmak için;** kit ile birlikte gelen anahtar aparatını test kitindeki sokete takıp 180° çeviriniz.
6. Sonuçları görmek için kabın arka kısmında bulunan açılabilir etiketi çıkartınız.
7. Isı etiketini kontrol ederek minimum 32°C olduğundan emin olun. (Yeşil renk 2-4 dakika içinde belirecektir) Böylece idrar numunesinin taze olduğunu kontrol etmiş olacaksınız.
8. Sonuçlar 1-5 dakika içinde görülebilir. 8 dakikadan sonra test geçersizdir.
9. Pozitif sonuçların farklı bir method ile Toksikoloji Laboratuvarlarında konfirme edilmesi gerekir.



Sonuçların değerlendirilmesi:


C: Kontrol alanı
T:Test alanı

• **Negatif:**

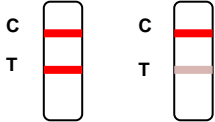


> Hem kontrol (C) hem de test (T) alanında kırmızı ve/veya pembe renkler oluşmasıdır. Her kanalda mutlaka 1 adet kontrol (C) alanı vardır. Test alanları (T) ise kanallara göre ilgili uyuşturucu maddeleri temsil etmektedir.

• **Pozitif:**

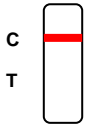

> Sadece kontrol (C) alanında çizgi görülmesidir. Test alanı (T) tamamen boş (renksiz) olmalıdır.

• **Geçersiz:**

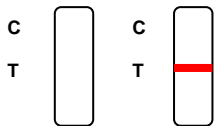

> Kontrol (C) alanında çizgi görülmemesi halinde test geçersizdir.

Notlar:

- Üretici firma: Nal von minden GmbH – Moers: Carl-Peschken-Straße 9 D-47441 Moers, Germany – Regensburg: Schikanederstraße 2a D-93053 Regensburg, Germany - Den Haag: Laan van Waalhaven 305 NL-2497 GL Den Haag, Holland
- Türkiye tek yetkili temsilcisi: Arma Danışmanlık Temsilcilik Tur. Med. San. Tic. Ltd. Şti. – Turan Güneş Bulvarı, Ukrayna Cad. 596 Sk. No:3/B Çankaya - Ankara
- GMP ilkelerine göre üretilmiş ve CE onaylıdır.
- Sertifikalar: TÜV, ISO 9001:2000 ve 13485:2003
- GC/MS yöntemiyle teyit edilmeden önce %99 oranında güvenilir ön bilgi almak için kullanılır.